


KOD KATALOGOWY	AM-ADS-R
NAZWA HANDLOWA	ORTEZA BIODRA
MODEL	AM-ADS-R
CODE	AM-ADS-R
TRADE NAME	HIP ORTHOSIS
MODEL	AM-ADS-R

PL: CZĘŚCI SKŁADOWE ORTEZY:

- A. Rzępy stabilizujące
- B. Pasy
- C. Aparat derotacyjny



EN: COMPONENTS OF THE BRACE :

- A. Brace
- B. Straps
- C. Derotative splint

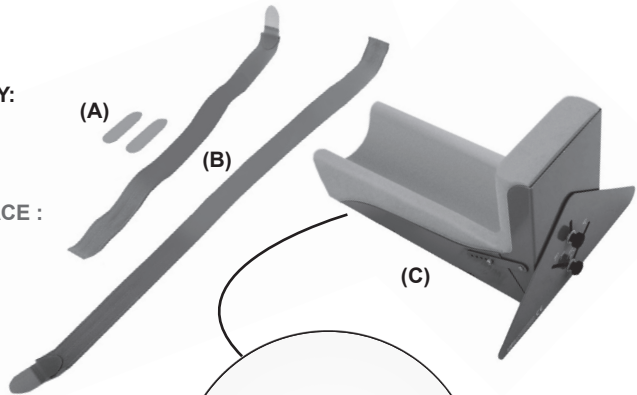


1. PL: Rozepnij ortezę i przyklej rzępy stabilizujące (A) do podstawy aparatu w odpowiednim miejscu. Następnie przypnij pasy (B).

EN: Unfasten the orthosis and attach the stabilizing Velcro fasteners (A) to the correct place on the base. Then fasten the straps (B).

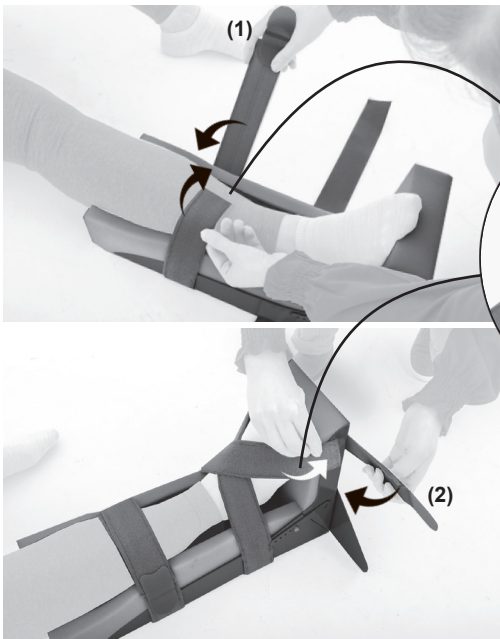
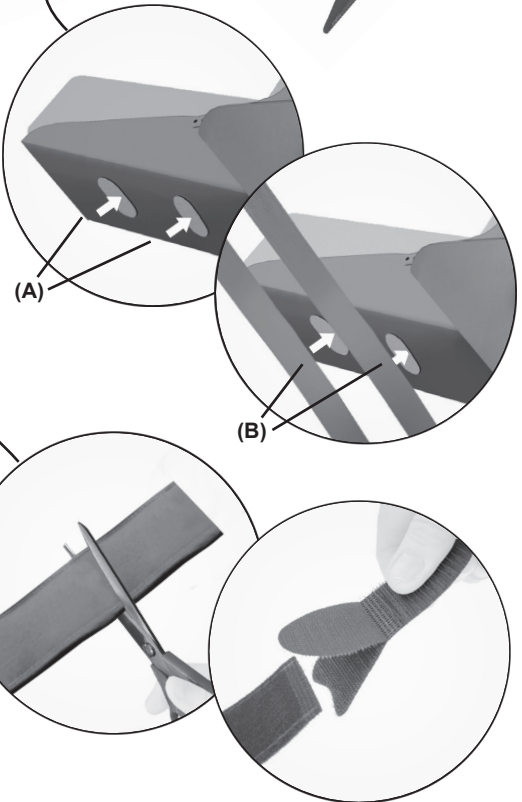


2. PL: Zapnij pasy na rzępy (1,2). Jeśli jest potrzeba odepnij rzep, odetnij ich zbędną długość i ponownie przypnij rzep.

EN: Close the Velcro straps (1,2). If necessary, unfasten the Velcro, cut off the excess length and re-fasten the Velcro.

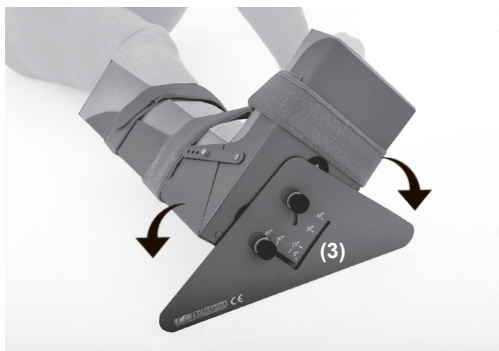

- 3. PL:** Przy pomocy trójkąta derotacyjnego (3), ustaw stopę w odpowiedniej pozycji.
EN: Using the derotation triangle (3), set the desired limb position.

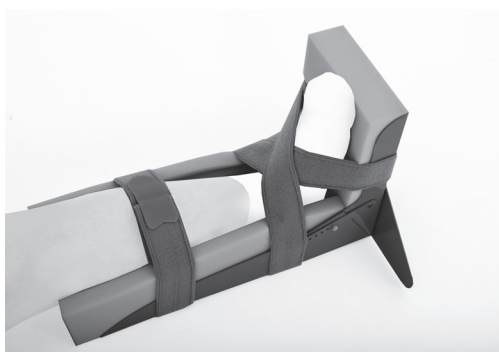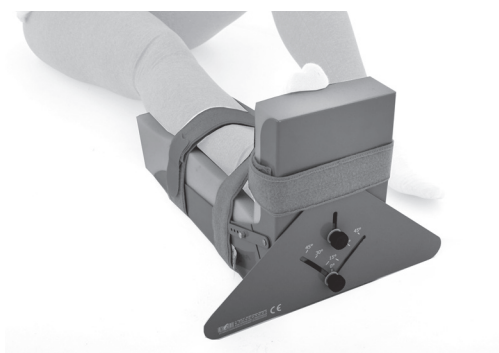

- 4. PL:** Gotowy wyrób.
EN: The product is ready to use.