


KOD KATALOGOWY	AM-SB/1R
NAZWA HANDLOWA	ORTEZA KOŃCZYNY DOLNEJ
MODEL	ORTEZA KOŃCZYNY DOLNEJ AM-SB/1R
CODE	AM-SB/1R
TRADE NAME	LOWER-EXTREMITY SUPPORT
MODEL	LOWER-EXTREMITY SUPPORT AM-SB/1R

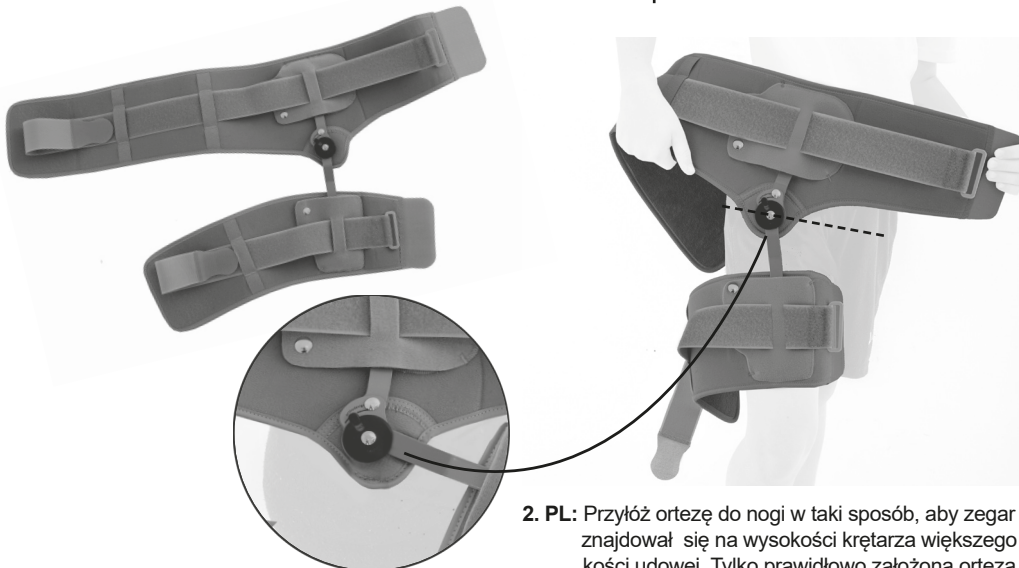

1. PL: Przed założeniem ortozy na kończynę, zegar powinien być ustawiony w określonym przez lekarza prowadzącego zakresie ruchomości stawu biodrowego.

EN: Before you place the brace on the leg, the range of motion in the drop lock should be adjusted according to doctor's recommendations.



2. PL: Przyłóż ortezę do nogi w taki sposób, aby zegar znajdował się na wysokości krętarza większego kości udowej. Tylko prawidłowo założona orteza pozostaje w osi stawu biodrowego i przylega równomiernie do całej kończyny.

EN: Place the brace on your leg so that the ROM is at the height of the greater trochanter of the femur. Only a properly fitted brace remains in the axis of the hip joint and adheres evenly to the entire limb.



3. PL: Ustaw odpowiedni obwód ortozy. Zapnij pas (1) i opaskę udową (2) na rzep.

EN: Adjust the appropriate circumference of the brace. Fasten the belt (1) and the thigh strap (2) with Velcro.

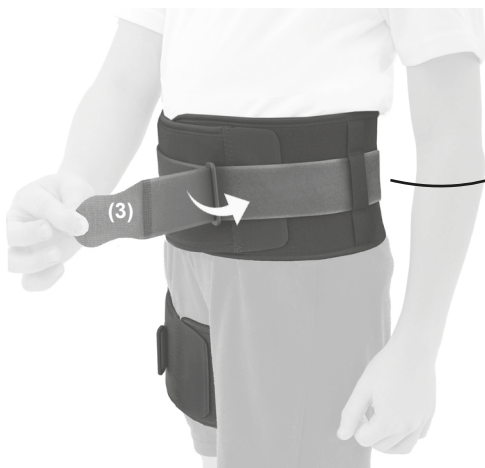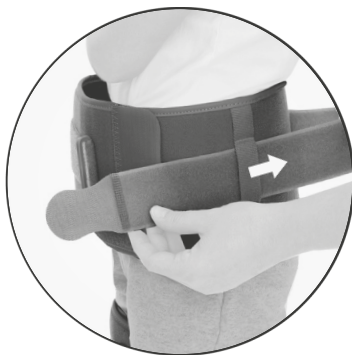


UWAGA! ATTENTION!

PL: Przy obwodzie minimalnym należy wyjąć pasek obwodowy z przelotki w elemencie pasa i opaski udowej.

EN: At the minimum circumference remove the circumference strap from the grommet in the belt and thigh band element. Fasten the thigh strap (4) in the same way.

4. PL: Przepleć pasek przez klamrę. Ustaw odpowiednie napięcie taśmy i zapnij na rzep (3). W ten sam sposób zapnij taśmę udową (4).

EN: Interlace the strap through the buckle. Adjust the appropriate tension of the strap and fasten with Velcro (3). Fasten the thigh strap (4) in the same way.

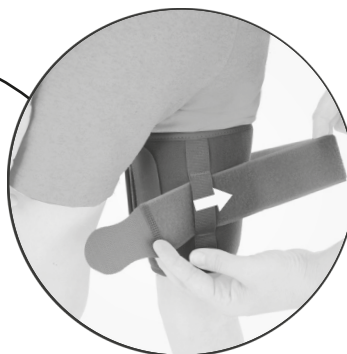



- 5. PL:** Gotowy wyrób.
EN: The product is ready to use.