


KOD KATALOGOWY	TB-05
NAZWA HANDLOWA	ORTEZA KRIOTERAPEUTYCZNA
MODEL	TB-05
CODE	TB-05
TRADE NAME	ICE AND COMPRESSION THERAPY WRAP
MODEL	TB-05

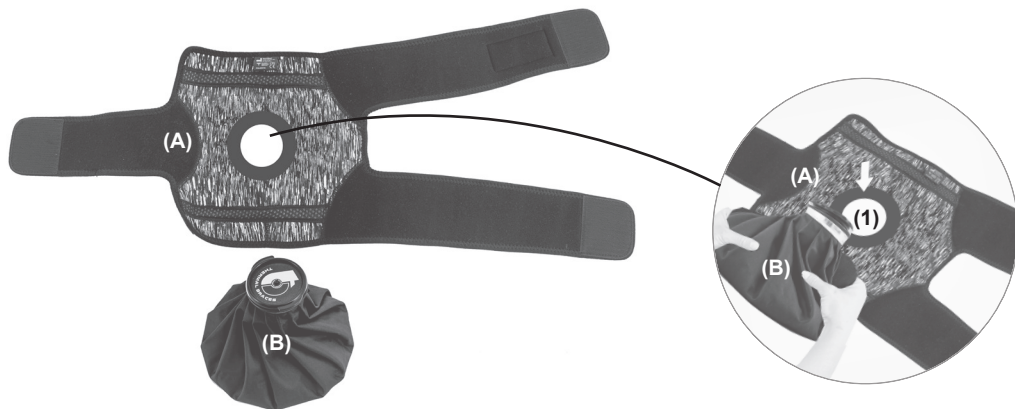


PL: A. Orteza B. Worek
EN: A. Brace B. Bag





- 1. PL:** Rozepnij ortezę (A). Uzupełnij worek (B) kruszonym lodem lub gorącą wodą i umieść w otworze (1).
EN: Unfasten the brace (A). Fill the bag (B) with crushed ice or hot water and place it in the opening (1).



- 2. PL:** Przyłóż ortezę z workiem w odpowiednim miejscu (2).
EN: Place the brace with the bag in the right place (2).

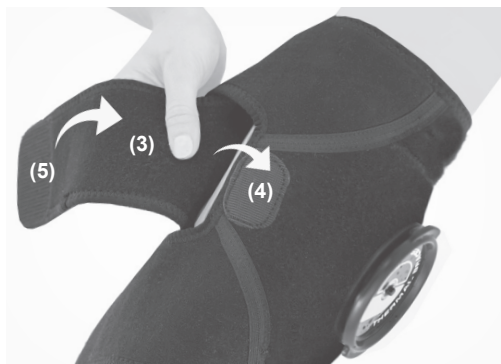

- 3. PL:** Ustabilizuj wyrób na kończynie, zapinając pas (3) na rzepy (4,5).
EN: Stabilize the product on the limb by fastening the strap (3) on the Velcro (4,5).

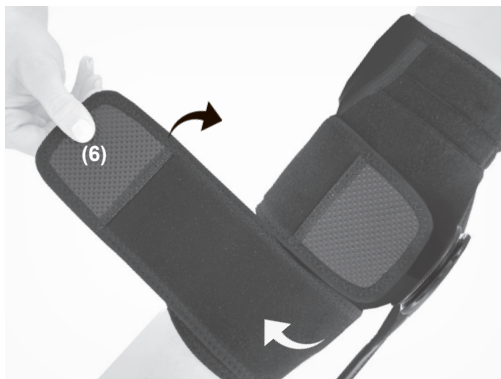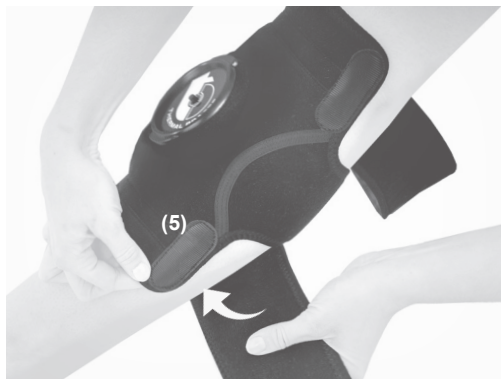

- 4. PL:** Ustaw odpowiednią kompresję i zapnij rzepy w podanej kolejności (5,6,7,8).
EN: Set the correct compression and fasten the Velcro in the given order (5,6,7,8).

Łokieć / Elbow



Przedramię / Forearm



Podudzie/ Calf



Kostka / Ankle



6. PL: Gotowy wyrób w różnych konfiguracjach.

EN: Product is ready to use in various configurations.