


KOD KATALOGOWY	TB-06
NAZWA HANDLOWA	ORTEZA KRIOTERAPEUTYCZNA
MODEL	TB-06
CODE	TB-06
TRADE NAME	ICE AND COMPRESSION THERAPY WRAP
MODEL	TB-06

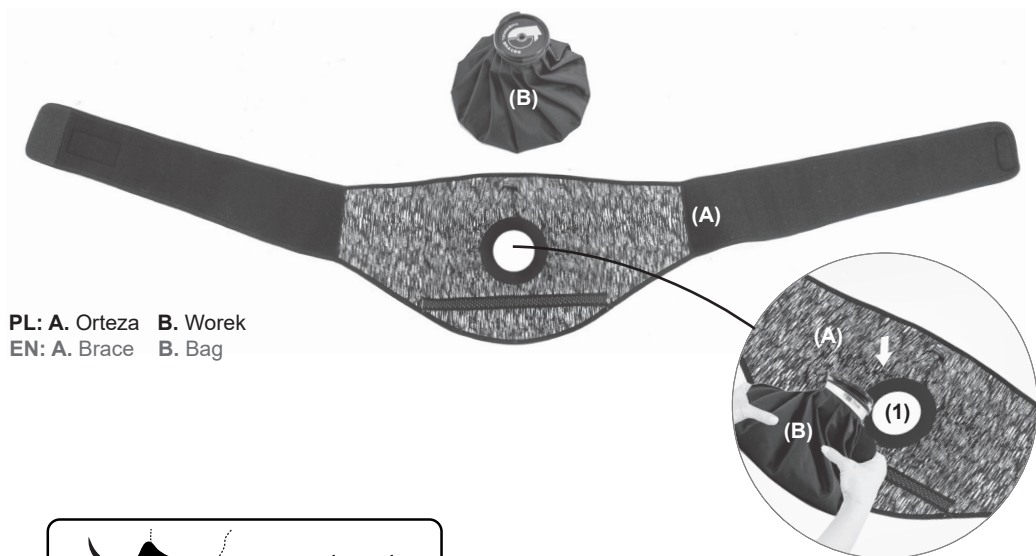

PL: A. Orteza B. Worek
EN: A. Brace B. Bag




**NIE NAKŁADAĆ NA SKÓRĘ
JEŚLI PRODUKT JEST
GORĄCY!**

**DON'T APPLY ON THE SKIN
IF THE PRODUCT IS HOT!**


1. PL: Rozepnij ortezę (A). Uzupełnij worek (B) kruszonym lodem lub gorącą wodą i umieść w otworze (1).

EN: Unfasten the brace (A). Fill the bag (B) with crushed ice or hot water and place it in the opening (1).

I. PL: BIODRO
EN: HIP

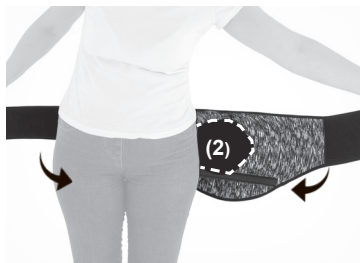

**II. PL: PLECY
EN: BACK**

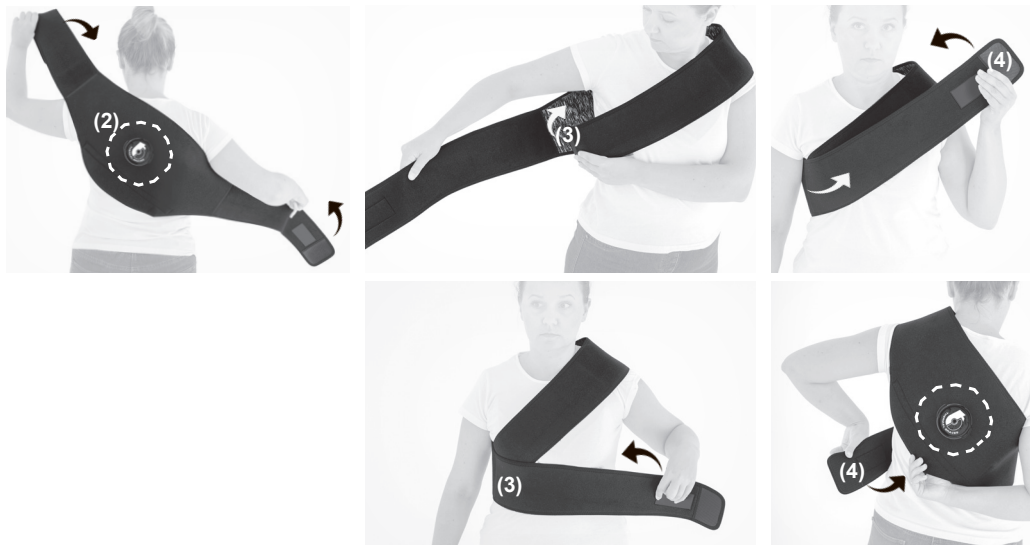


**III. PL: ODCINEK LĘDŹWIOWO-KRZYŻOWY KRĘGOSŁUPA
EN: LUMBOSACRAL SECTION OF THE SPINE**




3. PL: Przyłóż ortezę z workiem (B) w odpowiednim miejscu (2). Ustaw odpowiednią kompresję i zapnij pas na biodrze, plecach lub na odcinku lędźwiowo krzyżowym w podanej kolejności (3,4).

EN: Place the brace with the bag in the right place (2). Set the appropriate compression and fasten the product on your hip, back or lumbosacral section of the spine in the order shown (3,4).

I. PL: BIODRO
EN: HIP

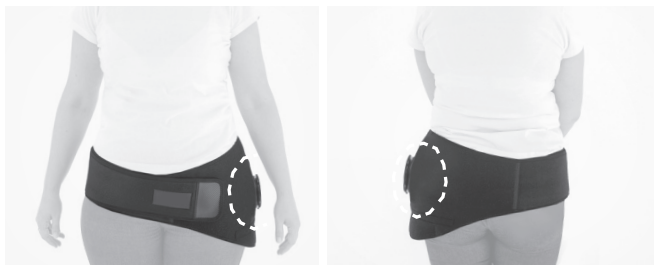

II. PL: PLECY
EN: BACK

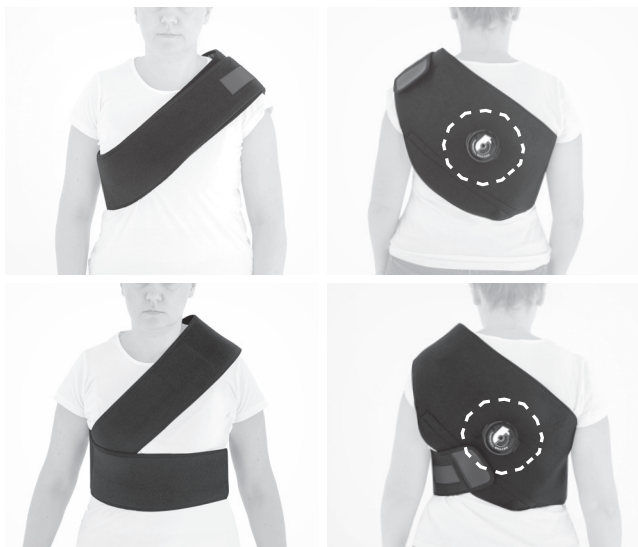

III. PL: ODCINEK LĘDŹWIOWO-KRZYŻOWY KRĘGOSŁUPA
EN: LUMBOSACRAL SECTION OF THE SPINE



4. PL: Gotowy wyrób.
EN: Product is ready to use.